



Nova-Blend programma 2023



Jan 2023

NOVA-BLEND ID NIETS TE VEEL, MAAR OOK NIET TE WEINIG

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en DC unit. Dit betekent dat alle behandelingen (met Diathermie en Gelijktroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is een aanrader!



Deze technieken kunnen voor veel behandelingen worden gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden behandelen (Telé's, Spinnævie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen en massages

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegenhoudt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig.
	Proefset van 10 Balletnaalden Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald.

Afkortingen:

HF	Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC	Gelijktroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend	Combineren/mengen van HF en DC

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom hebben we voor de hoofdfuncties aparte LCD schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. Eventuele foutmeldingen zijn te zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en is daarom ideaal voor ambulante werk of om mee naar school te nemen.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**

PRIJSLIJST NOVA-BLEND ID PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met iDEAL.

Standaard verkoopprijs Incl. btw **3800,00**

Kopen		
Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	565,00
Uw prijs is dan		3230,00

Kopen en betalen in 6 maanden		
Kopen in 6 maanden		Incl. btw
Uw Korting	10%	380,00
Uw prijs is dan		3420,00
Termijn 1		728,33
5x per maand		538,33

Kopen en betalen in 12 maanden		
Kopen in 12 maanden		Incl. btw
Uw Korting	5%	190,00
Uw prijs is dan		3610,00
Termijn 1		475,00
11x per maand		285,00

Huren (minimaal 3 maanden)

Huurkoop mogelijk in 24 maanden		Incl. btw
Eerste 3 maanden		
Borgsom		190,00
3 mnd. huur*		375,00
Totaal		565,00
Verlengen mnd 4 t/m 12		
Per maand		125,00
Na 12 maanden wordt tarief		
Per maand		175,83
Na 24 maanden eigendom		
Korting:		
Bij koop binnen 3 maanden 15%		
Bij koop binnen 6 maanden 10%		
Bij koop binnen 12 maanden 5%		

Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl		Incl. btw
Nova-Blend.nl		
Ballet rvs		37,00
Ballet gold		59,00
Ballet gold telé		59,00
Naaldhouder		54,99
Blendpincet inox		54,95
Pincet fibroom		16,50
Scalpelhouder		93,50
Bolelektrode ion.		60,45



Nova-Blend programma 2023



Jan 2023

NOVA-BLEND ID-PLUS

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!



Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Telé's, Spinnaveivie, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

Deze Nova-Blend heeft 20% meer HF vermogen. Ook ziet men het aantal behandelde haren en de gewerkte tijd in het scherm. Bij juist instellen van de tijd en unithaar wordt automatisch de Elektrolyse ingesteld. Een handige optie.

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegenhoudt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho.
	Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig.
	Proefset van 10 Balletnaalden Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald.

Afkortingen:

HF Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
 DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
 Blend Combineren/mengen van HF en DC

Om fouten te voorkomen en de bediening eenvoudig en intuïtief te maken, hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. In het scherm zijn ook eventuele foutmeldingen te zien. Zelfs kabelcontrole is nu mogelijk! Op de achterkant vindt men een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen. Scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en is daarom ideaal voor ambulante werk of om mee naar school te nemen.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**

PRIJSLIJST NOVA-BLEND ID-PLUS PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met iDEAL.

Standaard verkoopprijs Incl. btw **4150,00**

Kopen		
Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	622,50
Uw prijs is dan		3527,50

Kopen en betalen in 6 maanden		
Kopen in 6 maanden		Incl. btw
Uw Korting	10%	415,00
Uw prijs is dan		3735,00
Termijn 1		795,42
5x per maand		587,92

Kopen en betalen in 12 maanden		
Kopen in 12 maanden		Incl. btw
Uw Korting	5%	207,50
Uw prijs is dan		3942,50
Termijn 1		518,75
11x per maand		311,25

Huren (minimaal 3 maanden)

Huurkoop		
Huurkoop mogelijk in 24 maanden		Incl. btw
Eerste 3 maanden		
Borgsom		207,50
3 mnd. huur*		412,50
Totaal		620,00
Verlengen mnd 4 t/m 12		
Per maand		137,50
Na 12 maanden wordt tarief		
Per maand		191,04
Na 24 maanden eigendom		
Korting:		
Bij koop binnen 3 maanden 15%		
Bij koop binnen 6 maanden 10%		
Bij koop binnen 12 maanden 5%		

Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl		
Nova-Blend.nl		Incl. btw
Ballet rvs		37,00
Ballet gold		59,00
Ballet gold telé		59,00
Naaldhouder		54,99
Blendpincet inox		54,95
Pincet fibroom		16,50
Scalpelhouder		93,50
Bolelektrode ion.		60,45



Nova-Blend programma 2023

Jan 2023



NOVA-BLEND IQ

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!








Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:

- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Telé's, Spinnaveie, Fibromen e.d.)
- Iontoforese, (Soft) Mesotheapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

De IQ heeft naast de extra's van de iD-plus een extra "Sense" scherm voor regelen van de BEEB, Handsfree instellen pijnpunt en ook instellen Naloogtijd. Het instellen van de tijd gaat met de toetsen sneller. Na uitzetten apparaat worden gangbare instellingen gereset.

Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek of Iontho. Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig.
	Proefset van 10 Balletnaalden Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal of verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald.

Afkortingen:

HF	Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC	Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforesse, Kataforesse e.d.
Blend	Combineren/mengen van HF en DC

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm leest men naast de standen de tijd per haar af. Eventuele foutmeldingen zijn te zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig en daarom ideaal voor ambulante werk of mee naar school te nemen.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**

PRIJSLIJST NOVA-BLEND IQ

PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met iDEAL.

Standaard verkoopprijs Incl. btw **4700,00**

Kopen		
Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	705,00
Uw prijs is dan		3995,00

Kopen en betalen in 6 maanden		
Kopen in 6 maanden		Incl. btw
Uw Korting	10%	470,00
Uw prijs is dan		4230,00
Termijn 1		900,83
5x per maand		665,83

Kopen en betalen in 12 maanden		
Kopen in 12 maanden		Incl. btw
Uw Korting	5%	235,00
Uw prijs is dan		4465,00
Termijn 1		587,50
11x per maand		352,50

Huren

Huren		
Huurkoop mogelijk in 24 maanden		Incl. btw
Eerste 3 maanden		
Borgsom		235,00
3 mnd. huur*		450,00
Totaal		685,00
Verlengen mnd 4 t/m 12		
Per maand		150,00
Na 12 maanden wordt tarief		
Per maand		222,08
Na 24 maanden eigendom		
Korting:		
Bij koop binnen 3 maanden 15%		
Bij koop binnen 6 maanden 10%		
Bij koop binnen 12 maanden 5%		

Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden, pincetten etc.		
Balletnaalden.nl		Incl. btw
Nova-Blend.nl		
Ballet rvs		37,00
Ballet gold		59,00
Ballet gold telé		59,00
Naaldhouder		54,99
Blendpincet inox		54,95
Pincet fibroom		16,50
Scalpelhouder		93,50
Bolelektrode ion.		60,45



Nova-Blend programma 2023



Jan 2023

NOVA-BLEND IQ-SUMMUM

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden. Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:



- Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
- Huidoneffenheden (Telé's, Spinnaveiv, Fibromen e.d.)
- Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
- RF en RF + DC behandelingen

De iQ-Summum werkt met de drie rechter toetsen net zo als de iQ. We noemen het de iQ mode. Gaat men de linker toetsen gebruiken, dan zijn de pedalen overbodig geworden. Men kan zich nu volledig concentreren op de klant. Lekker makkelijk! Maar nog belangrijker is de betere werkhouding waarmee rug en nekklachten kunnen worden voorkomen. Mede mogelijk gemaakt door onze geavanceerde software.

De Nova-Blend wordt compleet geleverd met:

	Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen houdt, de HF versterkt en DC geleidt. Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer.
	Handelektrode + sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals o.a. bij de Blendtechniek en bij werken zonder pedalen Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat.
	AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid.
	Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Met deze Nova-Blend kan men ook zonder pedalen werken. Bij Telé's, Fibromen e.d. ideaal. Ook ontharen is makkelijk. Met 1 of 2 pedalen werken blijft mogelijk.
	Proefset van 10 Balletnaalden Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 van medisch staal en verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé naald.

Afkortingen:

HF	Hoog Frequent voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC	Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend	Combineren/mengen van HF en DC

Bij de iQ-Summum wordt steeds gedetecteerd of de naald contact heeft met de huid. Zodra dat het geval is, geeft hij automatisch stroom. Dit hoeft niet altijd. U kunt de activeringstijd instellen. De optimale activeringstijden zijn voorgeprogrammeerd. Maar u kunt ze wijzigen. Wordt contact met de huid verbroken, dan stopt de stroom. De timer schakelt in de pedaal loze stand de stroom uit. In de iQ-mode niet. Dan hoort men alleen de BEEB.

*** Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.**

PRIJSLIJST NOVA-BLEND IQ-SUMMUM PRIJZEN IN €

Graag bestellen via webshop en afrekenen met iDEAL.

Standaard verkoopprijs Incl. btw **5600,00**

Kopen		
Kopen		Incl. btw
Uw Korting	15%	840,00
Uw prijs is dan		4760,00

Kopen en betalen in 6 maanden		
Kopen in 6 maanden		Incl. btw
Uw Korting	10%	560,00
Uw prijs is dan		5040,00
Termijn 1		1073,33
5x per maand		793,33

Kopen en betalen in 12 maanden		
Kopen in 12 maanden		Incl. btw
Uw Korting	5%	280,00
Uw prijs is dan		5320,00
Termijn 1		700,00
11x per maand		420,00

Huren

Op dit moment is er geen mogelijkheid de IQ-SUMMUM te huren

Balletnaalden, pincetten etc.

Balletnaalden.nl Nova-Blend.nl		Incl. btw
Ballet rvs		37,00
Ballet gold		59,00
Ballet gold telé		59,00
Naaldhouder		54,99
Blendpincet inox		54,95
Pincet fibroom		16,50
Scalpelhouder		93,50
Bolelektrode ion.		60,45